

Link do produktu: <https://www.intermarkt.pl/krople-nawilzajace-do-oczu-bauschlomb-renu-advanced-10-ml-p-1484.html>



Krople nawilżające do oczu Bausch+Lomb Renu Advanced 10 ml

Cena	21,90 zł
Dostępność	Dostępny
PKWiU	21.20.13.0
Producent	Horien

Opis produktu

Bausch+Lomb ReNu ADVANCED 10 ml

Krople nawilżające do soczewek kontaktowych są wskazane dla osób noszących soczewki kontaktowe oraz osób z objawami zespołu suchego oka.

Zaawansowane nawodnienie

RENU ADVANCED to nawilżające krople do soczewek kontaktowych opracowane z myślą o zwiększonym utrzymaniu nawilżenia i wzbogacone o niezbędne elektrolity, aby pomóc przywrócić naturalne środowisko oka, stabilizować film łzowy oraz oferować długotrwały komfort noszenia soczewek kontaktowych.

Długotrwały komfort

Elektrolity wspierają skład filmu łzowego, pomagając chronić powierzchnię oka.

Mogą być stosowane ze wszystkimi rodzajami miękkich i twardych soczewek kontaktowych, wyraźnie poprawiając komfort ich noszenia przez cały dzień.

CECHY PRODUKTU:

Oxyd: delikatny środek konserwujący, który w kontakcie z powierzchnią oka przekształca się w wodę, tlen i sole mineralne,

będące naturalnymi składnikami łez.

Sposób użycia kropli:

Zaleca się mycie rąk przed każdym użyciem produktu ReNu ADVANCED krople nawilżające do soczewek kontaktowych.

1. Odkręć nakrętkę butelki z kroplami do oczu.
2. Nieznacznie odchyl głowę do tyłu i palcem wolnej ręki lekko odciągnij w dół dolną powiekę, trzymając butelkę pionowo nad okiem (nie dotykając przy tym powierzchni oka).
3. Ściśnij butelkę, aby wprowadzić pojedynczą kroplę do dolnego worka spojówkowego.
4. Zamknij oko i powoli poruszaj gałką oczną w obie strony, aby zapewnić optymalne rozprowadzenie kropli produktu na powierzchni oka.

W razie potrzeby powtórz tę czynność dla drugiego oka, a następnie szczelnie zamknij butelkę.

Uwaga, nie dotykaj końcówki butelki palcami. Pozwoli to zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu roztworu.

SKŁAD:

0,15 % kwas hialuronowy (w postaci hialuronianu sodu); 0,5 % glikol polietylenowy 8000 (PEG 8000); chlorek potasu; chlorek wapnia; chlorek magnezu; chlorek sodu; wodorotlenek sodu; woda oczyszczona; kwas borowy i Oxyd (łagodny środek konserwujący, który na powierzchni oka ulega przemianie w wodę, tlen i sól).

Aplikacja do oka: Zależnie od potrzeb podawać 1–2 krople do każdego oka.

Okres stosowania: Krople nawilżające do soczewek kontaktowych mogą być stosowane codziennie, tak często, jak jest to potrzebne. Brak ograniczeń dotyczących długości okresu stosowania.

Okres przydatności do użycia: Po otwarciu krople nawilżające do soczewek kontaktowych można stosować przez 8 tygodni.

Przechowywanie produktu: Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +25 °C.

Pojemność: 10 ml